

Flacon oculaire de solution saline Avec trousse porte-ceinture

Référence : EPOPS

Description :

Lave-œil d'une solution saline de chlorure de sodium à 0,9%.

Cette solution permet d'enlever les poussières et les corps étrangers présentes dans l'œil, comme des huiles, des éclats de bois et de métal.

Le flacon est stérile et à usage unique, pour réaliser un lavage oculaire efficace, sans causer de lésions supplémentaires.

Le flacon est facile à utiliser grâce à son œillère ergonomique qui maintient l'œil ouvert, ce qui permet d'assurer un flux de liquide fin et régulier.

Flacon de 200 ml, correspondant à 2 minutes de rinçage.

Le flacon est proposé avec une trousse pouvant s'accrocher sur une ceinture ou une combinaison de travail, afin d'accéder rapidement au flacon par l'utilisateur.

Cette trousse est un étui souple et elle protège le flacon des poussières et saletés.

Fabriqué en textile et de coloris verte, elle a un symbole de « rinçage des yeux ».

Conseil d'utilisation :

Tourner l'œillère dans le sens indiqué par les flèches pour briser l'opercule et ouvrir le flacon.

Presser légèrement le flacon pour que le liquide glisse dans l'œil.

Le lavage s'effectue la tête en arrière et peut également être effectué la tête en avant, en restant tout autant efficace.

Pour un lavage efficace, utiliser la totalité du flacon.

