

Poche de gel chaud / froid réutilisable

Référence : PGFCS

Description :

Poche de gel thermique chaud / froid réutilisable, idéale pour soulager les douleurs.

Pour être efficace, cette poche doit être appliquée au moins une demi-heure sur la zone douloureuse, sans contacts directs avec la peau et placée dans la housse de protection (livrée avec la poche de gel).

Cette poche possède des dimensions de L 280 x l 140 mm. Elle est composée d'un gel d'eau stabilisé et de cellulose.

Le froid est efficace en cas de contusions, de claquages, d'entorses, de déchirures musculaires, de brûlures légères, d'hématomes, de maux de têtes...

Le chaud est efficace en cas de douleurs articulaires ou rhumatismales, de lombalgies et de tensions musculaires...



Utilisation :

Avant utilisation :

- Vérifier que la poche n'est pas percée ;
- Nettoyer et désinfecter la poche à l'aide de désinfectant normalisé avant tout réemploi ;
- Contrôler la date de péremption, indiquée sur la poche.
- **Pour une utilisation à froid :** placer la poche nue au minimum 2 heures dans le compartiment froid du réfrigérateur ou 30 minutes au congélateur, avant utilisation ;
- **Pour une utilisation à chaud :** chauffer la poche nue durant 10 minutes dans de l'eau chaude à environ 80°C, avant utilisation.

Avant d'appliquer la poche sur la zone douloureuse, l'envelopper dans une housse de protection (fournie), à usage unique.

Pour maintenir la poche de gel, vous pouvez fixer l'ensemble avec une bande élastique (non fournie) : veuillez à avoir une tension satisfaisante.

Recommandations :

Lors d'un transport, disposer la poche de gel dans un emballage isotherme, après l'avoir sortie du réfrigérateur ou du congélateur.

Conservez le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité, sous une température ambiante comprise entre 15°C et 30°C.

Le gel contenu dans la poche n'offre pas de danger pour un contact direct avec la peau, même lésée. Il ne contient pas de composant toxique. Ne pas laisser à portée des enfants.

Dispositif médical de la classe I (Directive 93/42 CEE).

Conforme à l'obligation de marquage CE.